


Z Fill Fina till medium rynkor – ungdomligt utseende & attraktiva läppar

- modern, monofasisk gel
- låg extrudering kraft
- mjuka och naturliga övergångar genom mjuk gelkonsistens
- god spridningsförmåga
- enkel modellering
- enkel hantering med en spruta av hög kvalitetsglas

Tvär bunden hyaluronsyra

HA koncentration	23 mg/ml
Stabilisator	BDDE
Sterilitet	steril
pH	7.0
Dynamisk viskositet	~ 500,000 mPa·s
Molekylvikt	3 miljoner Daltons
Grad av tvärbinding	+
Förpackning	1x1 ml
Nål	2 x 27 G ½
Varaktighet	6-9 månader

Z Fill tillämpning

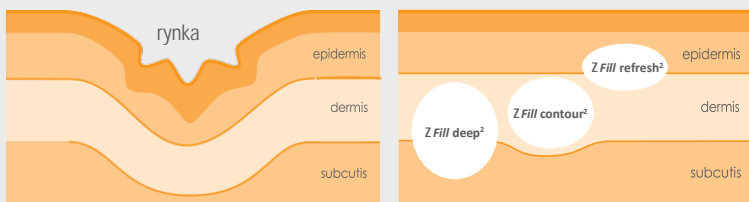

contour²



Indikationer



Z Fill

Applikationsexempel

Kombinationer med ZFill refresh²



90 dagar efter behandling med ZFill contour²

3 sessioner med ZFill refresh²

Kombinationer med Botulinum



1 Behandling av Botulinum +
3 Behandlingar av ZFill refresh²

1 behandling Botulinum + 1 behandling av
ZFill contour² (för vredes rynkor, front-
tvärgående rynkor, eller övre läpp rynkor)



ZFill refresh²
Mesotherapy för
naturlig
regenerering



ZFill deep²
gel för medelstora
och djupa rynkor

Injektionsteknik



Linjär retrograd teknik



Fläkt teknik



Kors och tvär teknik




Fiskbens teknik av Dr Nuwayhid

Cryo 6 Derma cold air maskin för fillerbehandling


Före injektion, kyla ner huden till omkring 10- 15 ° C under några sekunder. Detta har en smärtstillande effekt. Nu injicera ZFill försiktigt men snabbt in i huden och massera det område som ska behandlas för att fördela fillern och för att förhindra biverkningar. Även utan bedövningsmedel känner patienterna signifikant mindre smärta och tolererar behandlingen mycket bättre. En kort kylning förhindrar också fula svullnader och rodnader. För upp till 2 timmar, bör dina patienter använda ansiktsmuskeln så lite som möjligt. Detta underlättar integrationen av implantatet in i den omgivande cellaggregat.

Fördelar för läkare och patient

- Din patient förblir opåverkad av bedövningsmedel
- Du kan omedelbart börja arbeta utan att vänta på inverkan av bedövningsmedel
- Inga oönskade kors interaktioner på grund av injektion av flera ämnen

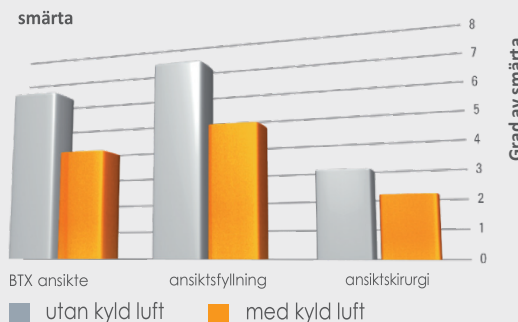

Studier har visat att: Cryo6 Derma minskar smärtan avsevärt i samband med ansiktskirurgi (studie av Dr. Steiner, Biberach)

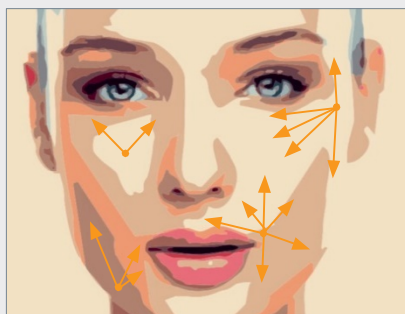

Tillämpningsområden för trubbig kanyl

Den trubbiga kanylen erbjuder ett brett spektrum av applikationer. Innan du använder den trubbiga kanylen, bekräfta varje godkänd användningsområde.



Den korrekta trubbiga kanylen

- 30G/25 mm: lämplig för ZFill refresh²
- 27G/40 mm: lämplig för ZFill contour² & ZFill refresh² (easy flow)
- 25G/50 mm: lämplig för ZFill contour² (easy flow) & ZFill deep²
- 23G/30 mm: lämplig för ZFill deep² (lättflytande)